
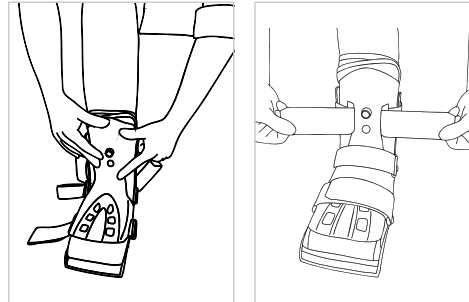


BITTE LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DES DONJOY® NEXTEP XCEL™ ANKLE WALKER DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG DURCH. DAS SACHGEMÄSSE ANLEGEN DER ORTHESE IST EINE WESENTLICHE VORAUSSETZUNG FÜR EINEN ERFOLGREICHEN THERAPIEVERLAUF.

Anlegeanleitung

1. Setzen Sie sich zum Anlegen des DONJOY® Nextep Xcel™ Ankle Walkers bequem hin.
2. Öffnen Sie alle Gurte und entfernen Sie die Vorderabdeckung (Frontschale) des Walkers.
3. Stellen Sie Ihren Fuß in den Walker. Schließen Sie das Innenfutter (Liner) mit den Klettlaschen. Achten Sie darauf, dass der vordere Teil (Zehenbereich) richtig über dem Vorfuß liegt.
4. Positionieren Sie die Frontschale und schließen Sie die Gurte – beginnen Sie am Zehenbereich und arbeiten Sie sich dann nach oben. Ziehen Sie den oberen Gurt auf beiden Seiten gleichmäßig an, damit das Vorderteil zentriert bleibt. Die Gurte nicht zu fest anziehen und je nach Schwellung verändern.

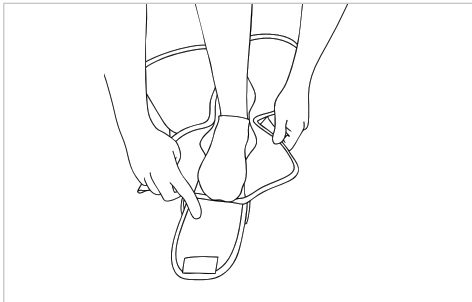

5. Zum Ausziehen des Walkers öffnen Sie die Gurte. Nehmen Sie dann die Vorderabdeckung ab und öffnen Sie den Innenschuh. Ziehen Sie den Fuß vorsichtig aus dem Walker heraus.

ZWECKBESTIMMUNG / ANWENDUNGSGEBIETE:

Der Donjoy Nextep Xcel Ankle Walker wurde entwickelt, um Fuß und Sprunggelenk zu stabilisieren und zu immobilisieren. Er kann zur Behandlung von schweren akuten Sprunggelenksverstauchungen, Weichteilverletzungen am Fuß und Sprunggelenk, Stressfrakturen des Fußes, stabilen Fußfrakturen sowie von Bänderverletzungen wie einer Plantarfasziitis geeignet sein.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Eine vollständige Liste der Kontraindikationen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen finden Sie in der Gebrauchsanweisung

REINIGUNG

Den Innenschuh (Liner) zur Reinigung in kaltem Wasser mit milder Seife von Hand waschen. Die Kunststoffteile können mit einem Tuch und milder Seifenlösung oder einem geeigneten Desinfektionsmittel gereinigt werden. Anschließend an der Luft trocknen lassen.

**FÜR DIE VERWENDUNG DURCH EINEN EINZELNEN PATIENTEN BESTIMMT
NICHT AUS NATURKAUTSCHUKLATEX HERGESTELLT**

HINWEIS: Dieses Produkt wurde mit großer Sorgfalt entwickelt und hergestellt, um eine hohe Funktionalität, Stabilität, Haltbarkeit und einen guten Tragekomfort zu gewährleisten. Dennoch kann nicht garantiert werden, dass durch die Verwendung dieses Produkts Verletzungen vollständig verhindert werden.

BESTELLINFORMATION

ARTIKELNUMMER	EU-SCHUHGRÖSSE	SCHUHGRÖSSE
82-112-S	< 39	S
82-112-M	39 - 44	M
82-112-L	> 44	L



enovis™

Creating Better Together™

enovis-medtech.de

ORMED GmbH, Bötzinger Straße 90, 79111 Freiburg, DEUTSCHLAND

Wichtiger Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass weder DJO, LLC, noch eine seiner Tochtergesellschaften medizinische Ratschläge geben können. Die Inhalte dieser Anlegeanleitung stellen keine medizinische, rechtliche oder andere Art professioneller Beratung dar. Informationen im Hinblick auf unterschiedliche Gesundheitszustände, Erkrankungen und körperliche Verfassungen und deren Behandlung sind nicht als Ersatz für eine Beratung durch einen Arzt oder anderes medizinisches Fachpersonal gedacht. Die Ergebnisse können individuell unterschiedlich sein. Diese Anlegeanleitung enthält allgemeine Informationen zur Orientierung. Für die Richtigkeit aller Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden und es können keine Rechtsansprüche gegen die Verfasser der Anlegeanleitung oder gegen denjenigen, der diese Anlegeanleitung übergeben hat, abgeleitet werden.