


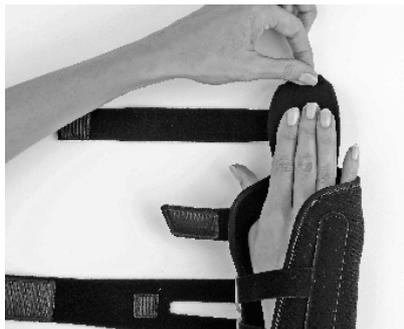

1. Orthese anlegen

- Die Bänder lösen und die Hand so in der Orthese positionieren



2. Lagerungsschiene positionieren

- Die Finger-Lagerungsschiene sollte weit genug heraus stehen, um über die Fingerspitzen zu reichen
- Position der Stütze kann individuell eingestellt werden
- Verstellbare Gurte und Überzug der Schiene befestigen



3. Daumen positionieren

- Daumen in die Öffnung am oberen Ende der Orthese einschieben (linke oder rechte Öffnung).
- Die zweite Öffnung sollte leer bleiben
- Hand/ -gelenk müssen genau zwischen beiden Schienen liegen
- Falls notwendig, bewegen Sie die dorsale Schiene, um die korrekte Position sicherzustellen
- Die formbaren Schienen können individuell angepasst werden



4. Mittleres Band fixieren

- Zuerst das mittlere Band straffziehen und befestigen



5. Restlichen Bänder fixieren

- Danach die beiden anderen Verschlussbänder straffziehen und befestigen



6. Fingergurt positionieren

- Fixieren Sie die Finger mit dem kleinen, frei positionierbaren Gurt



Hinweis: Die Fingerlagerungsschiene ist für vier Finger ausgelegt. Sollen nur drei Finger gelagert werden, biegen Sie die Schiene anhand der vorgegebenen Schlitze.

Wichtig: Die Schiene kann nur einmal gebogen werden. Hierbei besteht die Gefahr, dass sie bricht oder beeinträchtigt wird.

Größentabelle

GRÖßE	SEITE	BAUCHUMFANG	ARTIKEL-NR.
PED/XS	Universal	11 - 14 cm	82-96210
S	Universal	14 - 16 cm	82-96212
M	Universal	16 - 19 cm	82-96213
L	Universal	19 - 21 cm	82-96214
XL	Universal	21 - 24 cm	82-96215



enovis™

Creating Better Together™

enovis-medtech.de

ORMED GmbH, Bötzingen Straße 90, 79111 Freiburg, DEUTSCHLAND

Wichtiger Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass weder DJO, LLC, noch eine seiner Tochtergesellschaften medizinische Ratschläge geben können. Die Inhalte dieser Anlegeanleitung stellen keine medizinische, rechtliche oder andere Art professioneller Beratung dar. Informationen im Hinblick auf unterschiedliche Gesundheitszustände, Erkrankungen und körperliche Verfassungen und deren Behandlung sind nicht als Ersatz für eine Beratung durch einen Arzt oder anderes medizinisches Fachpersonal gedacht. Die Ergebnisse können individuell unterschiedlich sein. Diese Anlegeanleitung enthält allgemeine Informationen zur Orientierung. Für die Richtigkeit aller Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden und es können keine Rechtsansprüche gegen die Verfasser der Anlegeanleitung oder gegen denjenigen, der diese Anlegeanleitung übergeben hat, abgeleitet werden.