

Anleitung für das Anlegen der Schultergelenkorthese an Patienten in Rückenlage

Lesen Sie vor dem Anlegen die Gebrauchsanweisung sorgfältig und vollständig durch. Die korrekte Anwendung ist für die ordnungsgemäße Funktion der Schultergelenkorthese von entscheidender Bedeutung.

Indikationen

Die DONJOY PSI Plus Schultergelenkorthese dient der Stützung und Ruhigstellung des Schultergelenks nach Verletzungen oder Operationen.

Vor dem Anlegen:

Bevor die Orthese das erste mal angelegt wird:

- Die Unterarm- und Oberarmschlinge vom Hüftgurt entfernen.
- Der Haken am Hüftgurt sitzt immer auf der Seite der verletzten Schulter.

Anlage in Rückenlage

1. Den Hüftgurt vorsichtig unter dem Rücken durchschieben. Den Gurt leicht oberhalb der Hüfte schließen. Dabei darauf achten, dass der Hüftgurt in Richtung der verletzten Schulter geschlossen wird.



2. Die Oberarmschlinge nun auf der Seite der verletzten Schulter an den Hüftgurt kletten. Achten Sie darauf, dass der Verschluss mit dem Klettstreifen nach vorne schließt.



3. Den Unterarm in der Unterarmschlinge auf dem Hüftgurt mitte des Bauches platzieren.




4. Der Schultergurt wird über die unverletzte Schulter gelegt und mit der Unterarmschlinge verbunden.
 - Den Schultergurt so eingestellt, dass er stützend wirkt, aber bequem ist.
 - Der Gurt sollte keinen Druck auf den Hals ausüben.

Tipps:

- Die Gurte so einstellen, dass der Patient sich gestützt fühlt, diese aber nicht zu fest oder unbequem sitzen.
- Wenn der Schultergurt zu lang ist, sollte er zuerst am Rücken gekürzt werden. Dadurch kann die Vorderseite besser vom Patienten selbst angepasst werden.

Größentabelle

| ARTIKELNUMMER | HÜFTUMFANG | GRÖSSE |
|---------------|--------------|----------|
| 82-7440 | < 115 cm | Standard |
| 82-7441 | 115 – 160 cm | Large |

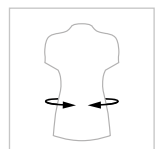

enovis™

Creating Better Together™

enovis-medtech.de

ORMED GmbH, Bötzingen Straße 90, 79111 Freiburg, DEUTSCHLAND

Wichtiger Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass weder DJO, LLC, noch eine seiner Tochtergesellschaften medizinische Ratschläge geben können. Die Inhalte dieser Anlegeanleitung stellen keine medizinische, rechtliche oder andere Art professioneller Beratung dar. Informationen im Hinblick auf unterschiedliche Gesundheitszustände, Erkrankungen und körperliche Verfassungen und deren Behandlung sind nicht als Ersatz für eine Beratung durch einen Arzt oder anderes medizinisches Fachpersonal gedacht. Die Ergebnisse können individuell unterschiedlich sein. Diese Anlegeanleitung enthält allgemeine Informationen zur Orientierung. Für die Richtigkeit aller Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden und es können keine Rechtsansprüche gegen die Verfasser der Anlegeanleitung oder gegen denjenigen, der diese Anlegeanleitung übergeben hat, abgeleitet werden.