


# DONJOY® ULTRASLING® QUADRANT

Eine neue Dimension in der Schulterversorgung

## Komponenten: Hüftgurt

- A1. Gurtverschluss
- A2. Anpassungsband des Gurtes
- A3. Steg
- A4. Anpassungslasche des Stegs
- A5. Vorderteil

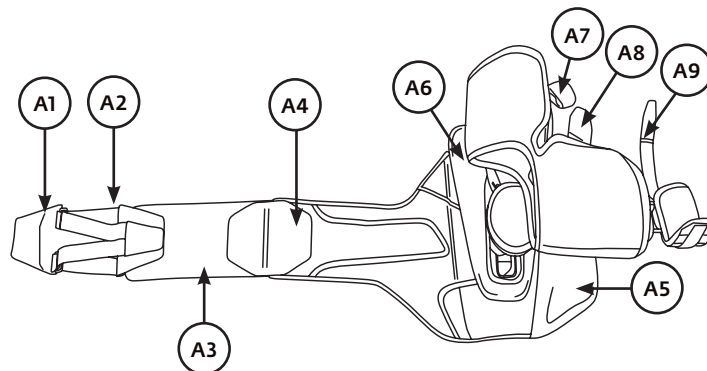


## Komponenten: Armorthese

- A6. Rahmen
- A7. Oberarmgurt
- A8. Unterarmgurt
- A9. Handgurt

### 1 Größe des Hüftgurts

Um die Länge des Hüftgurts zu verändern, muss die Anpassungslasche des Stegs neu positioniert werden.

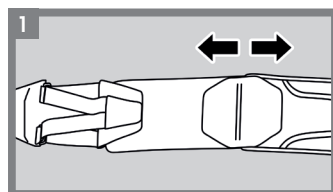


#### Hinweis für zierliche Patienten:

Entfernen Sie die Anpassungslasche des Stegs und den Steg selbst komplett.

### 2 Präparation der Orthese


#### 2a: Abduktion/Adduktion

Drücken Sie beide AB-Knöpfe ein und halten Sie diese. Stellen Sie das Element in 15°-Schritten so ein, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist. Die Knöpfe dann loslassen.

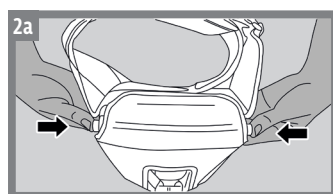


#### 2b: Innenrotation/ Außenrotation

Knopf gedrückt halten und gleichzeitig die IR/ER-Drehscheibe entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis die Armorthese locker genug ist, um sie in den angemessenen Winkel zu bringen. Die Drehscheibe durch Drehen im Uhrzeigersinn wieder anziehen, um die Orthese in der Position zu fixieren.

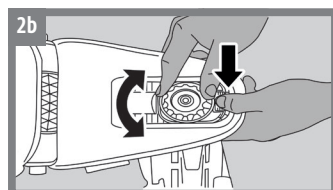


### 3 Anlegen der Orthese

**3a:** Wickeln Sie den Hüftgurt um Ihre Hüfte herum und befestigen Sie es dann am Vorderteil. Benutzen Sie das Anpassungsband des Gurtes, indem Sie daran ziehen, um die Spannung des Hüftgurtes einzustellen.

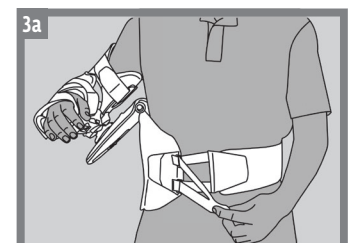


**Hinweis:** Die Orthese sollte so positioniert sein, dass sich der obere Teil des Rahmens etwa 5–6 cm über dem Bauchnabel befindet und die Armorthese mit der Schulter ausgerichtet ist.

**3b:** Um die Orthese zu befestigen, bringen Sie den Oberarmgurt über den Bizeps an. Das Gleiche mit dem Unterarmgurt über den Unterarm und den Handgurt über die Hand durchführen.

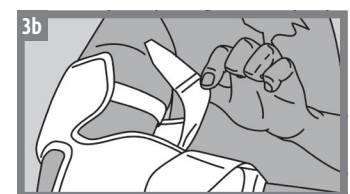


**3c:** Die Handstütze ausfahren, um die gewünschte Position und Unterstützung der Hand zu erzielen. Um einen besseren Sitz zu erzielen, den unteren Teil der Handstütze so biegen, dass er sich an die untere Handfläche anpasst.

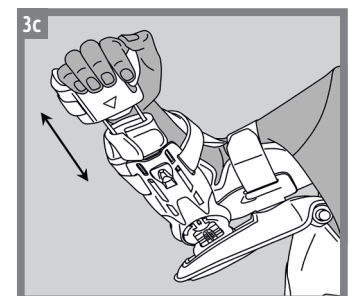

**Hinweis:** Bei Bedarf das optionale Handgelenkpolster anbringen.

#### 3d: Optionaler Schultergurt

Das Gurtende mit der Schnalle vorne am Hüftgurt über der Verschlusslasche des Gurts befestigen. Das andere Gurtende über die Brust ziehen und an der gegenüberliegenden Seite des Hüftgurts neben den AB-Knöpfen befestigen.

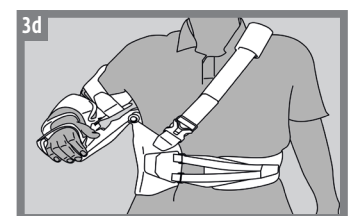

### 4 Abnehmen der Orthese

Lösen Sie Hand-, Unterarm-, Oberarm- und Hüftgurt. Legen Sie nun die Orthese ab.

**REINIGUNGSHINWEISE:** Vor dem Reinigen die festen Komponenten von den Textilteilen trennen. Per Hand mit Wasser (30 °C) und einem milden Reinigungsmittel waschen. An der Luft trocknen lassen. **VERWENDETE MATERIALIEN:** Nylon, Aluminium, Edelstahl, verzinkter Stahldraht, Kupfer, Nylon-Faser, Polyurethanschaum, Silikon, Epoxid, Polyurethan. **NICHT AUS NATURKAUTSCHUKLATEX HERGESTELLT.**

**Hinweis:** Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, unter Einsatz modernster Verfahren maximale Kompatibilität von Funktion, Festigkeit, Haltbarkeit und optimalem Sitz zu erzielen, kann keine Garantie gegeben werden, dass durch die Anwendung dieses Produktes Verletzungen vermieden werden können.