



CRYO/CUFF™

Kältetherapie-System

Reinigungs- und Desinfektionsanweisung für CRYO/CUFF™ Medizinprodukte

Die nachfolgenden Reinigungs- und Desinfektionshinweise sind Hinweise vom Hersteller, abgeleitet von den Richtlinien des „Center for Disease Control“ (CDC).

Zur Desinfektion müssen sterile Handschuhe getragen und danach entsorgt werden.

Reinigung der Kühlkanne mit Schlauch und der CRYO/CUFF-Manschette:

- 1) Wasser vollständig aus der Kanne, der Manschette und dem blauen Schlauch entfernen. Um den Schlauch zu entleeren, die Kanne anheben und gleichzeitig mit dem Finger auf das Verbindungsstück drücken.
- 2) Schlauch und Kanne werden mit einer milden Seifenlauge und heißem Wasser gereinigt. Das Seifenwasser sollte durch Anheben und Senken der Kanne einige Male zwischen Kanne und Manschette zirkulieren.
- 3) Mit klarem, 30°C warmem Wasser den gleichen Vorgang wiederholen.
- 4) So lange mit klarem Wasser ausspülen, bis jegliche Seifenrückstände entfernt sind.
- 5) Die Kanne bei offenem Deckel trocknen lassen.

Richtlinien zur Desinfektion:

Manschetten und Schläuche, die in Kontakt mit Patienten ohne offene Verletzungen kommen und die nicht mit möglichen Krankheitsüberträgern in Kontakt kamen, bedürfen sorgfältiger Reinigung mit mildem Reinigungsmittel oder leichtem Desinfektionsmittel.

Manschetten und Schläuche, die mit Blut oder sonstigen Körperflüssigkeiten verunreinigt sind, bedürfen vor Neugebrauch einer verstärkten Desinfizierung:

- 1) Vor der Desinfizierung die Manschette sorgfältig mit einem Reinigungsmittel reinigen, um die Gesamtkeimzahl zu verringern.
- 2) Die Manschette mit einem flüssigen chemischen Desinfektionsmittel behandeln. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung für empfohlene Lösung und Kontaktdauer des Desinfektionsmittels. Benutzen Sie zur Desinfizierung nur chemische Desinfektionsmittel, die als „sterilant“ registriert und explizit für die Reinigung medizinischer Geräte ausgewiesen sind.