

Anlegeanleitung

LESEN SIE BITTE VOR DER VERWENDUNG DER HANDGELENKORTHESE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG VOLLSTÄNDIG UND DAS KORREKTE ANLEGEN EINER ORTHESE IST FÜR DIE WIRKSAMKEIT UND DEN THERAPIEERFOLG ENTSCHEIDEND. BITTE SPRECHEN SIE BEI UNKLARHEITEN IHREN ARZT ODER SANITÄTSFACHHANDEL AN.

ANLEGEN UND NUTZUNG:


Das Produkt ist so konzipiert, dass es bei normalen Alltagsaktivitäten getragen werden kann.




1. Die Bänder lösen und die Hand so in der Orthese positionieren




2. Daumen in die Öffnung am oberen Ende der Orthese einschieben

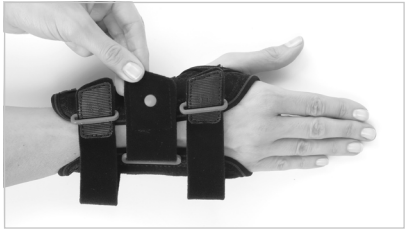

3. Zuerst das mittlere Band straff ziehen und befestigen

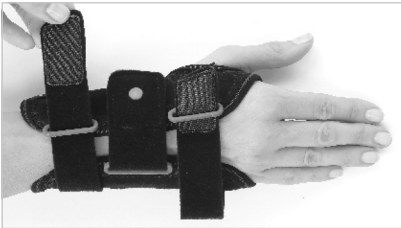

4. Danach das hintere Verschlussband straff ziehen und befestigen.

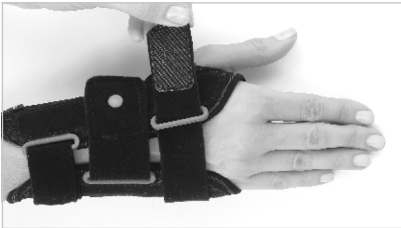


5. Das Daumenband anlegen und fixieren.

**Hinweis:**  
Die formbaren Schienen können individuell angepasst werden.  
Die Bänder gemäß erforderlichlichem Druck und Komfort festziehen.

GRÖSSEN

GRÖSSE	UMFANG HANDGELENK	ARTIKEL-NR. LINKS	ARTIKEL-NR. RECHTS
PED/XS	11-14 cm	82-96250	82-96260
S	14-16 cm	82-96252	82-96262
M	16-19 cm	82-96253	82-96263
L	19-21 cm	82-96254	82-96264
XL	21-24 cm	82-96255	82-96265

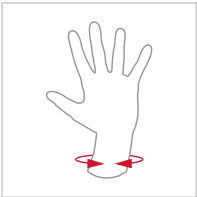

enovis™

Creating Better Together™

enovis-medtech.de

ORMED GmbH, Bötzingen Straße 90, 79111 Freiburg, DEUTSCHLAND

Wichtiger Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass weder die Firma DJO, LLC, noch eine seiner Tochterunternehmen eine medizinische Beratung leisten können. Die Inhalte dieser Anlegeanleitung stellen keine medizinische, rechtliche oder professionelle Beratung dar. Informationen zu verschiedenen Gesundheits- und Fitnesszuständen sowie medizinischen Befindlichkeiten und deren Therapie ersetzen nicht die Beratung durch einen Arzt oder andere medizinische Fachkräfte. Die Ergebnisse können individuell unterschiedlich sein. Diese Informationen dienen nicht der Diagnose eines Gesundheits- oder Fitnessproblems oder einer Erkrankung. Ob und welche Behandlung für Sie medizinisch sinnvoll ist, kann nur Ihr Arzt oder eine medizinische Fachkraft entscheiden. Diese Anlegeanleitung enthält allgemeine Informationen zur Orientierung. Für die Richtigkeit aller Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden und es können keine Rechtsansprüche gegen die Verfasser der Anlegeanleitung oder gegen denjenigen, der die Anlegeanleitung übergeben hat, abgeleitet werden.