

Verordner-Leitfaden

ARTROMOT® Homecare-Mietservice

Motorisierte CPM-Bewegungsschienen für das Knie- und Hüftgelenk

Eigenschaften

- Bewegungsumfang maximal:
 - Extension/Flexion „Knie“: -10°/0°/120°
 - Extension/Flexion „Hüfte“: 0°/7°/115°
- Umfangreiche Sonder- und Sicherheitsfunktionen

Die Einstellungen der Funktionen und Bewegungsausmaße erfolgt gemäß Ihrer Vorgaben auf dem Therapieplan und immer im schmerzfreien Bereich, direkt beim Patienten zu Hause.

Indikationen

- Arthrotomien und Arthroskopien in Kombination mit Synovektomie, Arthrolyse
- Nach Gelenkmobilisation in Narkose
- Operativ versorgte Frakturen und Pseudarthrosen
- Umstellungsosteotomien
- Übungsstabile Osteosynthese
- Gelenknahe Weichteileingriffe
- Patellektomien/Meniskektomien
- Hüftarthroskopien
- Knie-/Hüft-TEP
- Kreuzbandplastiken
- Komplexe Knieoperationen
- Operationen am Gelenkknorpel, z. B. ACT, Microfracture
- Arthrosen mit Bewegungseinschränkungen



ARTROMOT®-KI
COMFORT CHIP

Verordnung

Der Behandlungsbeginn ist direkt postoperativ

3 Schritte zur erfolgreichen Versorgung Ihrer Patienten:

1. Rezept vollständig ausstellen, siehe Beispiel:
Hinweise:
 - Hilfsmittelname bei Hüfte:
 - 1 ARTROMOT® Knie-Hüftbewegungsschiene
 - Verordnungsdauer: i. d. R. zwischen 2 und 4 Wochen
 - Diagnose: siehe Indikationen

Rezept für: Leber/Darm: J. Obere/Obert
 1 ARTROMOT Kniebewegungsschiene
 HMV-Nr.: 32.04.01.0 für Wochen
 Diagnose:
 OP-Datum:, Entl.-Datum:
 Tel. Patient:
 abfert

2. ARTROMOT®-Therapieplan ausfüllen
(Wichtig für die korrekte Auslieferung an Ihren Patienten und die Genehmigung durch den Kostenträger!)
3. Therapieplan und Rezept umgehend und im Einklang mit dem Patientenwahlrecht an DJO® faxen.
Die Originalrezepte bitte 1 x pro Woche im kostenlosen Rückumschlag an DJO® senden.
Kostenlose Rückumschläge erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Wir kümmern uns um Ihre Patienten vor Ort, sowie die Kostenübernahme durch gesetzliche Versicherungen (GKV und GUV)!

Ihre Service-Hotline: **Telefon 0800 1 676 333**
Telefax 0800 3 676 333
Homecareservice@DJOglobal.com

Kassenmanagement:
Kassenmanagement@DJOglobal.com

Verordner-Leitfaden

ARTROMOT® Homecare-Mietservice

Motorisierte CPM-Bewegungsschienen für das Sprunggelenk

Eigenschaften

- Bewegungsumfang maximal:
 - Plantarflexion/Dorsalextension: 50°/0°/40°
 - Inversion/Eversion: 40°/0°/20°
- Bewegungsmuster:
 - Anatomisch korrekt gemäß PNF-Pattern: Plantarflexion mit Inversion/Dorsalextension mit Eversion (Nierenförmig)
 - Isoliert: reine Plantarflexion/Dorsalextension oder reine Inversion/Eversionsbewegung
- Umfangreiche Sonder- und Sicherheitsfunktionen

Die Einstellungen der Funktionen, Bewegungsmuster und Bewegungsausmaße erfolgt gemäß Ihrer Vorgaben auf dem Therapieplan und immer im schmerzfreien Bereich, direkt beim Patienten zu Hause.



ARTROMOT®-SP3
COMFORT CHIP

Indikationen

- Arthrotomien, Arthroskopien in Kombination mit Synovektomie, Arthrolyse
- Operativ versorgte Frakturen und Pseudarthrosen
- Übungsstabile Osteosynthesen
- Gelenknahe Weichteileingriffe
- Rekonstruktive Eingriffe an Sehnen und Bändern
- Operativ versorgte Knorpeldefekte
- Achillessehnenrekonstruktionen

Verordnung

Der Behandlungsbeginn ist direkt postoperativ

3 Schritte zur erfolgreichen Versorgung Ihrer Patienten:

1. Rezept vollständig ausstellen, siehe Beispiel:
Hinweise:
 - Verordnungsdauer: i. d. R. zwischen 2 und 4 Wochen
 - Diagnose: siehe Indikationen
2. ARTROMOT®-Therapieplan ausfüllen
(Wichtig für die korrekte Auslieferung an Ihren Patienten und die Genehmigung durch den Kostenträger!)
3. Therapieplan und Rezept umgehend und im Einklang mit dem Patientenwahlrecht an DJO® faxen.
Die Originalrezepte bitte 1 x pro Woche im kostenlosen Rückumschlag an DJO® senden.
Kostenlose Rückumschläge erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Rezept für Leichter- und -schwere Arbeit

1 ARTROMOT Sprunggelenkbewegungsschiene
HMV-Nr.: 32.02.01.0 für Wochen

Diagnose:
OP-Datum:, Entl.-Datum:

Tel. Patient:

Wir kümmern uns um Ihre Patienten vor Ort, sowie die Kostenübernahme durch gesetzliche Versicherungen (GKV und GUV)!

Ihre Service-Hotline: **Telefon 0800 1 676 333**
 Telefax 0800 3 676 333
 Homecareservice@DJOglobal.com

Kassenmanagement:
Kassenmanagement@DJOglobal.com