


ARM IMMOBILIZER


AIRCAST®

Legen Sie den Patienten die AIRCAST Arm Immobilizer in einer aufrechten Position im Sitzen oder Stehen an.

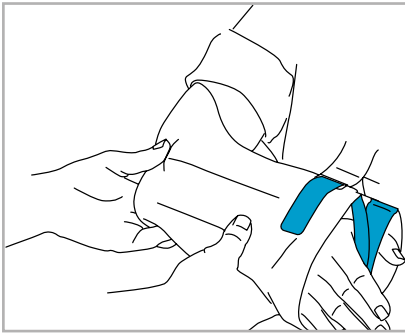


1. Unterarmschlinge anlegen

- Den Unterarm in die Schlinge einführen
- Der Daumen liegt auf der Innenseite der Handstütze, die Finger auf der Außenseite
- Der betroffene Arm wird vom gesunden Arm gestützt

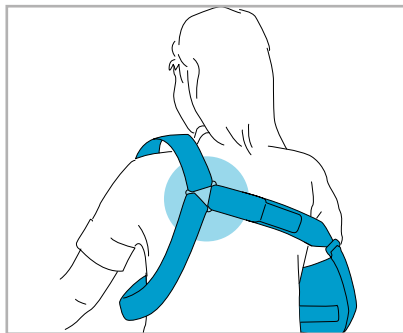


2. Schultergurt anlegen

- Das Plastikdreieck auf Höhe des Schulterblatts des gesunden Arms platzieren
- Die Gurte ausrichten und anpassen
- Den Schultergurt locker über die gesunde Schulter legen

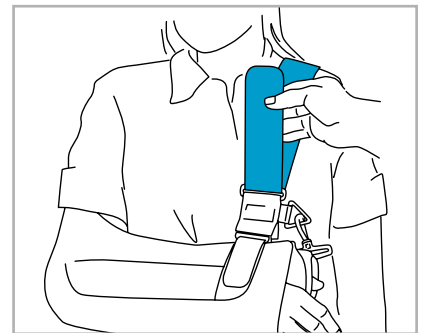

3. Schultergurt an Handschlinge befestigen


- Das Ende des Schultergurts durch den Ring am Immobilizer (Handschlinge) führen
- Gurtende vor dem Oberkörper am Schultergurt befestigen und festziehen
- Gurtlänge individuell anpassen

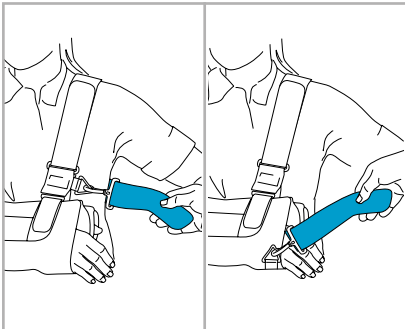

4. Unterarmgurt befestigen


- Unterarmgurt unter dem gesunden Arm durchführen
- Gurtende am Immobilizer einhängen
- Gurt individuell einstellen

HINWEIS: Wenn dies in der Brustgegend nicht bequem ist, kann der Clip auch unten an der Armschlinge eingehakt werden

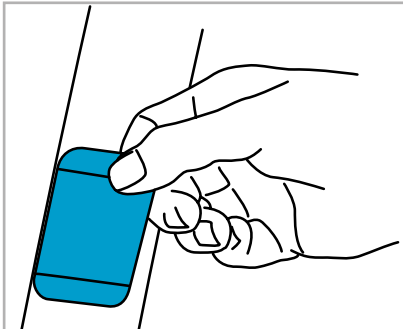

5. Gurte anlegen

- Armposition und Tragekomfort überprüfen
- Gurte bei Bedarf neu justieren
- Ist der Gurt zu lang, kann der - Klettverschluss auf der Unterseite des Gurts verschoben werden
- Die Gurte können bei Bedarf auch mit einer Schere auf die gewünschte Länge gekürzt werden

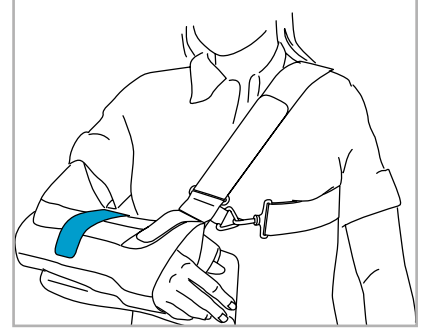

7. Abnehmen des Arm-Immobilizers

- Den Unterarmgurt aus dem Immobilizer aushängen
- Den Schultergurt lösen und den Immobilizer abnehmen

Größentabelle

GRÖßE	UNTERARMLÄNGE	ARTIKEL-NR.
Standard	< 25 cm	06GM
Lang	> 25 cm	06GL



enovis™

Creating Better Together™

enovis-medtech.de

ORMED GmbH, Bötzingen Straße 90, 79111 Freiburg, DEUTSCHLAND

Wichtiger Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass weder DJO, LLC, noch eine seiner Tochtergesellschaften medizinische Ratschläge geben können. Die Inhalte dieser Anlegeanleitung stellen keine medizinische, rechtliche oder andere Art professioneller Beratung dar. Informationen im Hinblick auf unterschiedliche Gesundheitszustände, Erkrankungen und körperliche Verfassungen und deren Behandlung sind nicht als Ersatz für eine Beratung durch einen Arzt oder anderes medizinisches Fachpersonal gedacht. Die Ergebnisse können individuell unterschiedlich sein. Diese Anlegeanleitung enthält allgemeine Informationen zur Orientierung. Für die Richtigkeit aller Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden und es können keine Rechtsansprüche gegen die Verfasser der Anlegeanleitung oder gegen denjenigen, der diese Anlegeanleitung übergeben hat, abgeleitet werden.