

Legen Sie den Patienten die DuoForm in einer aufrechten Position im Sitzen oder Stehen an.



1. Hand in die Orthese führen

- Gurte öffnen/ lösen und die Hand in die Orthese führen und positionieren



2. Daumen positionieren

- Daumen in die Öffnung am oberen Ende der Orthese einschieben (linke oder rechte Öffnung)
- Die zweite Öffnung sollte leer bleiben
- Hand/-gelenk müssen genau zwischen beiden Schienen liegen



3. Dorsale Schiene anpassen

- Falls notwendig, bewegen Sie die dorsale Schiene etwas um die dorsale Schiene etwas um die korrekte Position sicherzustellen
- Die formbaren Schienen können individuell angepasst werden



4. Mittleres Band fixieren

- Zuerst das mittlere Band straffziehen und befestigen



5. Restlichen Bänder fixieren

- Danach die beiden anderen Verschlussbänder straffziehen und befestigen



6. Tragekomfort überprüfen

- Verschlussbänder und Tragekomfort überprüfen und Bänder ggf. nochmal anpassen

Größentabelle

GRÖßE	SEITE	BAUCHUMFANG	ARTIKEL-NR.
PED/XS	Universal	11 - 14 cm	82-96130
S	Universal	14 - 16 cm	82-96132
M	Universal	16 - 19 cm	82-96133
L	Universal	19 - 21 cm	82-96134
XL	Universal	21 - 24 cm	82-96135



enovis™

Creating Better Together™

enovis-medtech.de

ORMED GmbH, Bötzingen Straße 90, 79111 Freiburg, DEUTSCHLAND

Wichtiger Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass weder DJO, LLC, noch eine seiner Tochtergesellschaften medizinische Ratschläge geben können. Die Inhalte dieser Anlegeanleitung stellen keine medizinische, rechtliche oder andere Art professioneller Beratung dar. Informationen im Hinblick auf unterschiedliche Gesundheitszustände, Erkrankungen und körperliche Verfassungen und deren Behandlung sind nicht als Ersatz für eine Beratung durch einen Arzt oder anderes medizinisches Fachpersonal gedacht. Die Ergebnisse können individuell unterschiedlich sein. Diese Anlegeanleitung enthält allgemeine Informationen zur Orientierung. Für die Richtigkeit aller Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden und es können keine Rechtsansprüche gegen die Verfasser der Anlegeanleitung oder gegen denjenigen, der diese Anlegeanleitung übergeben hat, abgeleitet werden.