


Fingerorthese zur Immobilisierung von 1 bis 2 Fingern

Indikationen:

- Fingerverstauchungen
- Subluxationen, Verrenkungen oder Frakturen
- Posttraumatische, prä- und postoperative Ruhigstellung



1. Die Schiene an den betroffenen und einen zusätzlichen, gesunden Finger anlegen.

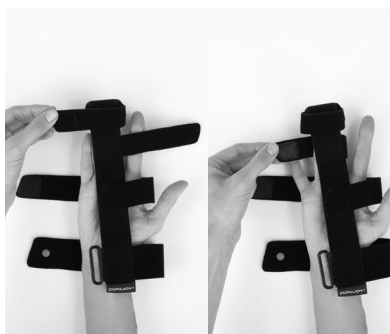

2. Die Schiene zunächst an den Fingerspitzen fixieren.



3. Das mittlere Band über den Handrücken fixieren. Falls notwendig, kann dieses Band neu positioniert werden.




4. Zuletzt noch das Handgelenksband fixieren.

Mehr zur DONJOY®
DigiForm™:



Größentabelle

GRÖßE	SEITE	HANDLÄNGE	ARTIKEL-NR.
PED/XS	Universal	11 - 15 cm	82-96200
S/M	Universal	15 - 19 cm	82-96202
L/XL	Universal	19 - 23 cm	82-96203

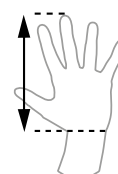

enovis™

Creating Better Together™

enovis-medtech.de

ORMED GmbH, Bötzingen Straße 90, 79111 Freiburg, DEUTSCHLAND

Wichtiger Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass weder DJO, LLC, noch eine seiner Tochtergesellschaften medizinische Ratschläge geben können. Die Inhalte dieser Anlegeanleitung stellen keine medizinische, rechtliche oder andere Art professioneller Beratung dar. Informationen im Hinblick auf unterschiedliche Gesundheitszustände, Erkrankungen und körperliche Verfassungen und deren Behandlung sind nicht als Ersatz für eine Beratung durch einen Arzt oder anderes medizinisches Fachpersonal gedacht. Die Ergebnisse können individuell unterschiedlich sein. Diese Anlegeanleitung enthält allgemeine Informationen zur Orientierung. Für die Richtigkeit aller Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden und es können keine Rechtsansprüche gegen die Verfasser der Anlegeanleitung oder gegen diejenigen, der diese Anlegeanleitung übergeben hat, abgeleitet werden.