

HYA-JECT®

Bewegung
neu erleben!

**BEHANDLUNG VON ARTHROSE
GROSSER UND KLEINER GELENKE
MIT HYALURONSÄURE**

enovis™

Wirksamkeit & Verträglichkeit durch:

- **Fermentative Hyaluronsäure**
- **Molekulargewicht: 1–2 Mio. Dalton**
- **Terminale Sterilisation für höchste Sicherheit: Inhalt und äußere Oberfläche der Spritze sind steril (SAL 10⁻⁶)**




Zur Behandlung von großen Gelenken

WIE KNIE-, HÜFT- ODER SCHULTERGELENK

- 1,0% Hyaluronsäure (20 mg/2 ml)
- 2 ml in Fertigspritze
- 3–5 Injektionen in große Gelenke im wöchentlichen Abstand




RÜCKGANG DER SCHMERZEN AUF DER VAS-SKALA (0–100 MM) DURCH HYA-JECT®

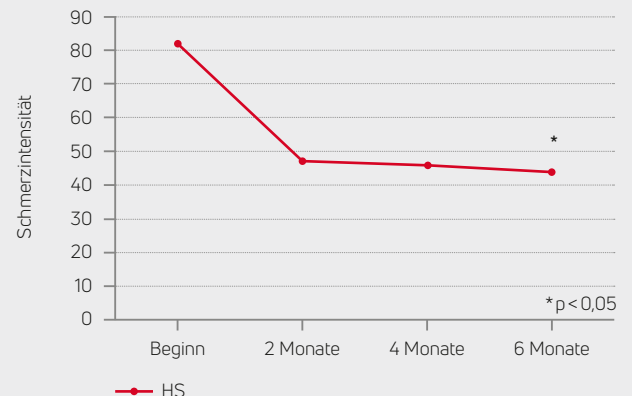

1) Arthrose der Hüfte

VERBESSERUNG DES WOMAC-SCORES DURCH HYA-JECT®

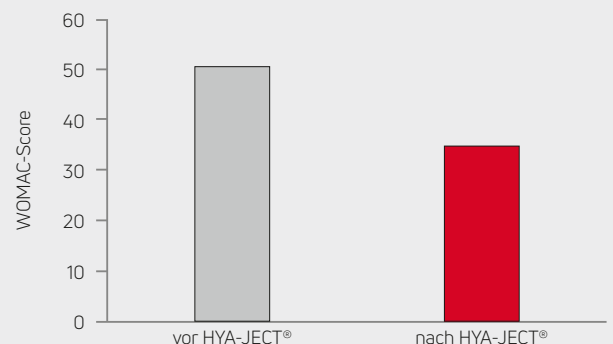

2) Arthrose im Knie

Studien:

- ¹ Pourbagher MA et al., J. Ultrasound in Med 2005; 24: 1391–1395.
- ² Rehm S, Wulle EL, Orthopädische Praxis 2017; 43: 7.
- ³ Fuchs S et al., Osteoarthritis Cartilage 2006 Jan; 14 (1): 82–8.
- ⁴ Fuchs S, Erbe T, Fischer H-L, Tibesku CO, Intraarticular Hyaluronic Acid versus Glucocorticoid Injections for Nonradicular Pain in the Lumbar Spine J Vasc Interv Radiol 2005; 16 (11): 1493–8.
- ⁵ Borrás-Verdera A et al., Orthopädische Traumatol 2012; 56 (4): 274–280.
- ⁶ Frobenius K, Eine neue Hochdosisbehandlung mit intraartikulärer Hyaluronsäure erleichtert das Behandlungsmanagement der Arthrose Orthopädische Praxis 2009; 46 (5): 252–7.

Studien und Anwendungsbeobachtungen wurden mit einem Hyaluronsäureprodukt durchgeführt, welches in der Zusammensetzung und Herstellung 100 % dem HYA-JECT® entspricht.

Für die Datenverwendung liegt die Herstellerfreigabe vor.

Zur Behandlung von kleinen Gelenken


WIE KIEFER-, FACETTEN-, DAUMENSATTEL- ODER GROSSZEHENGROUNDELENKE

- 1,0% Hyaluronsäure (10 mg/1 ml)
- 1 ml in Fertigspritze
- 1-3 Injektionen in kleine Gelenke im wöchentlichen Abstand




HS-Protektion durch Mannitol


- 2,0% Hyaluronsäure (40 mg/2 ml)
- + 0,5% Mannitol (10 mg)
- 2 ml in Fertigspritze
- 1-3 Injektionen im wöchentlichen Abstand

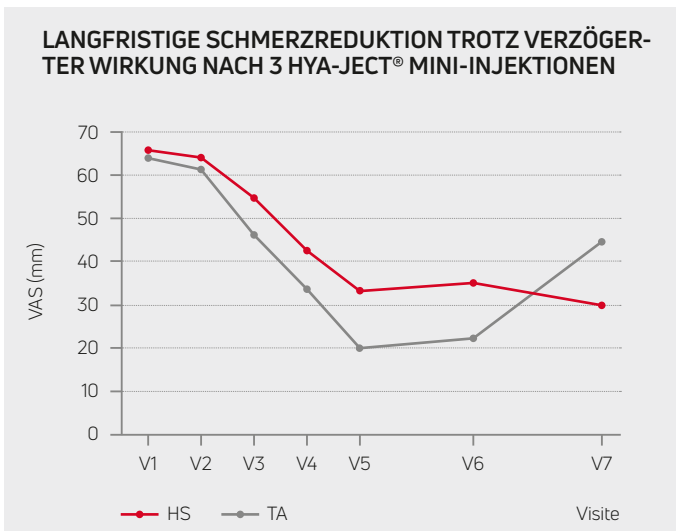


3) Arthrose des Daumensattelgelenks

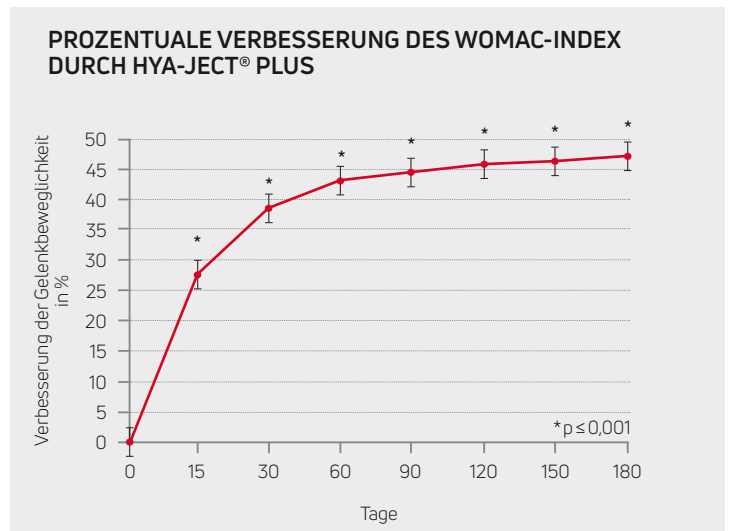

5) Gelenkschmerz, Gelenksteifheit, Gelenkfunktion

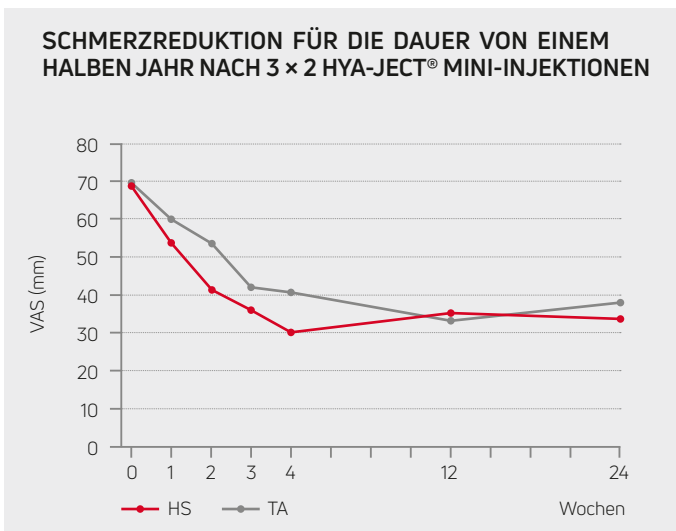

4) Arthrose der Facettengelenke

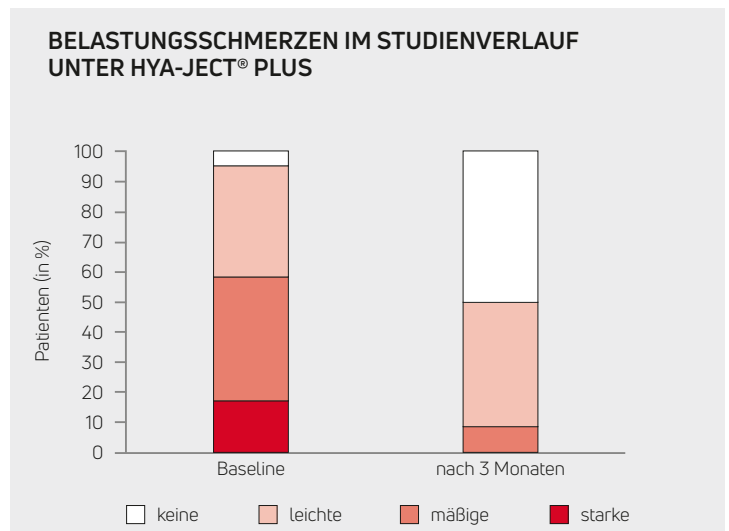

6) Arthrose im Knie oder Hüftgelenk

HYA-JECT®

PRODUKTÜBERSICHT

KONSERVATIVE BEHANDLUNG	GROSSE GELENKE	3–5 Injektionen im wöchentlichen Abstand	HYA-JECT®
	KLEINE GELENKE	1–3 Injektionen im wöchentlichen Abstand	HYA-JECT® MINI
	GROSSE GELENKE	1–3 Injektionen im wöchentlichen Abstand	HYA-JECT® PLUS
	SEHNEN	2 Injektionen im wöchentlichen Abstand	HYA-JECT® TENDON
OPERATIVE BEHANDLUNG			ARTROJECT®

- EIGENE STUDIEN
- EIGENE HERSTELLUNG
- EIGENE ZULASSUNG
- WIRKSAMKEIT & VERTRÄGLICHKEIT

enovis™

Creating Better Together™

Vertrieb:
ORMED GmbH
Bötzingen Straße 90
79111 Freiburg
DEUTSCHLAND



Hersteller:
TRB Chemedica AG
Otto-Lilienthal-Ring 26
85622 Feldkirchen
DEUTSCHLAND

enovis-medtech.de | **Tel. 0180 1 676 333** **Fax 0180 11 676 33** **E-Mail: medizintechnik@enovis.com**

Wichtiger Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass weder DJO, LLC, noch eine seiner Tochtergesellschaften medizinische Ratschläge geben können. Die Inhalte dieser Broschüre stellen keine medizinische, rechtliche oder andere Art professioneller Beratung dar. Informationen im Hinblick auf unterschiedliche Gesundheitszustände, Erkrankungen und körperliche Verfassungen und deren Behandlung sind nicht als Ersatz für eine Beratung durch einen Arzt oder anderes medizinisches Fachpersonal gedacht. Die Ergebnisse können individuell unterschiedlich sein. Diese Broschüre enthält allgemeine Informationen zur Orientierung. Für die Richtigkeit aller Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden und es können keine Rechtsansprüche gegen die Verfasser der Broschüre oder gegen denjenigen, der die Broschüre übergeben hat, abgeleitet werden.