

enovis™

ARTROMOT®

Motorisierte
Bewegungsschienen

Patientenkurzanleitung
ARTROMOT®-E2



Handsteuerung



ARTROMOT® Bewegungsschiene für Ellenbogen

Die ARTROMOT® Ellenbogenbewegungsschienen entsprechen den neuesten medizinischen Erkenntnissen. Sie sind bequem und einfach zu bedienen, besonders in der Heim Anwendung.

Warum hat der Arzt Ihnen die Bewegungstherapie verordnet?

- Vorbeugung von Gelenkversteifungen und Verklebungen
- Förderung der Heilung von Gelenkknorpel, Sehnen, Bändern und Weichteilgewebe
- Beschleunigung des Heilungsverlaufes
- Nachhaltige Sicherung des Behandlungserfolgs

Wie oft sollen Sie täglich üben?

- Soweit nicht anders vom Arzt verordnet, wird eine Behandlungszeit von 4 bis 5 mal täglich bis zu 60 Minuten empfohlen.
- Übungen immer im schmerzfreien Bereich ausführen.

Wer holt die Bewegungsschiene wieder bei Ihnen ab?

- Die Abholung organisieren wir für Sie. Kurz vor Ablauf der Verordnungszeit werden sie von einem Patientenbetreuer telefonisch kontaktiert, um den Termin für die Abholung zu vereinbaren.

Patientenbetreuer: _____

Telefon: _____

Gute Besserung wünscht
Ihr **ARTROMOT®-Team**




Handsteuerung im Menü Auswahlmodus

Aktueller Winkel der
Bewegungsschiene in
Extension / Flexion

Aktueller Winkel der
Bewegungsschiene in
Pronation / Supination


Aktuelle MENÜ-
Ebene

Zur Auswahl stehende
Parameter und zugehörige
Parametertasten

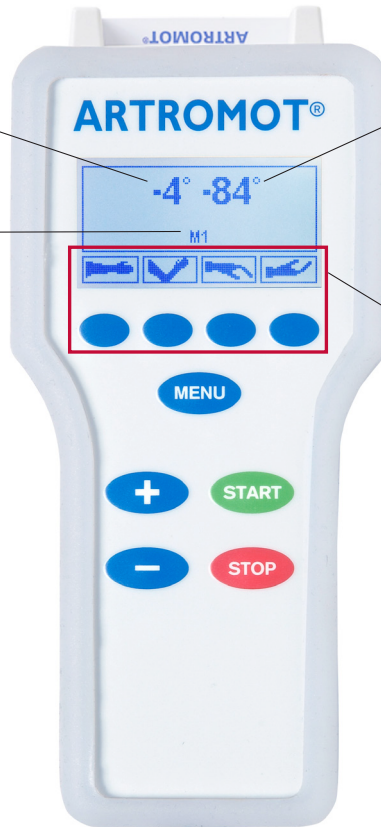

Handsteuerung im Programmiermodus

Einstellen des Bewegungsausmaß / -Limit

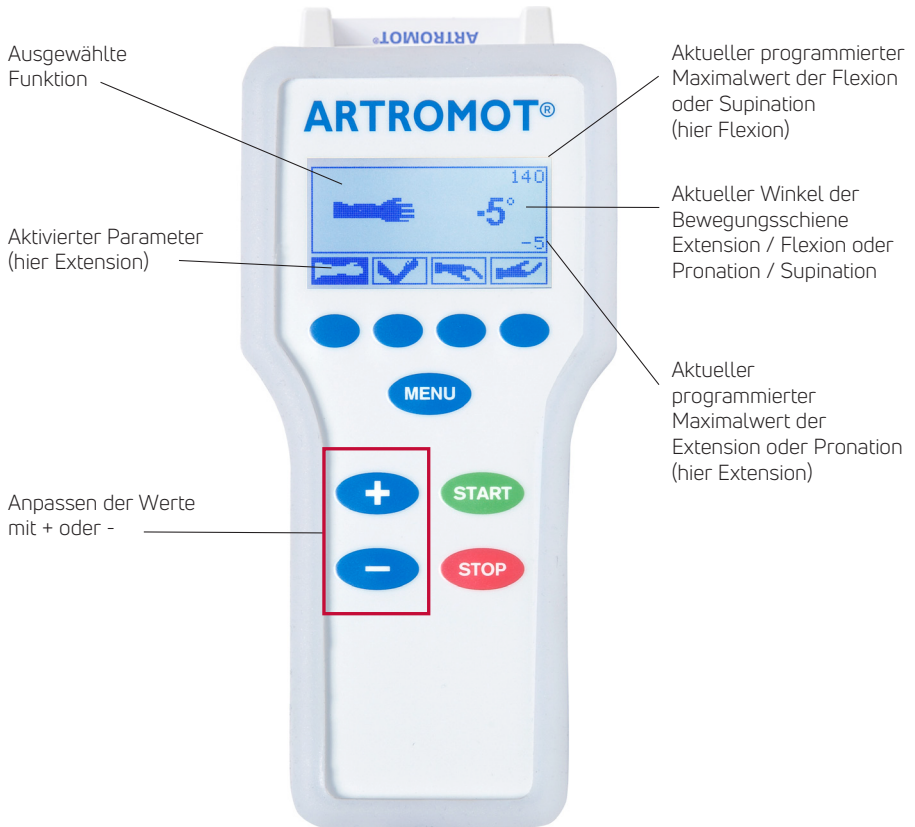

Kurzanleitung¹ Handsteuerung

Starten/Stoppen

1. **Netzstecker** einstecken.
2. ARTROMOT®-E2 am **Netzschalter** einschalten.
3. **Patienten-Chipkarte** in den dafür vorgesehenen Schlitz stecken.
4. **Starten:**  drücken.
5. **Stoppen:**  drücken.
6.  **Taste kurz drücken**

(Ebene „M1“ muss auf dem Display angezeigt werden)

Programmieren

7. Drücken Sie die Taste unterhalb des gewünschten Symbols, um die entsprechende **Funktion auszuwählen**.



= **Strecken des Unterarmes (Extension)**



= **Anwinkeln des Unterarmes (Flexion)**



= **Drehen der Handfläche nach unten (Pronation)**



= **Drehen der Handfläche nach oben (Supination)**

8. Zum **Verändern der Werte** der ausgewählten Funktion:
 oder  Taste drücken und gedrückt halten.
 Die Schiene fährt während der Einstellung die Bewegung mit.
9. **Speichern der Einstellung**



drücken. Zum **Starten** des Gerätes



drücken.



Achtung: Sie verändern beim Programmieren immer den Wert, der auf der Anzeige steht.



Gebrauchsanweisung
ARTROMOT®-E2



¹ Diese Beschreibung bezieht sich ausschließlich auf ARTROMOT® Ellenbogenbewegungsschienen mit Handkontroller „Grafik“ von Enovis. Die Kurzanleitung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung (MOT-324) und ärztliche Einweisung. Download Gebrauchsanweisung unter <https://www.enovis-medtech.de/downloads/gebrauchsanleitungen> (Filter: Produktkategorie > Bewegungsschienen)

² Bewegung, wenn nicht anders verordnet, immer im schmerzfreien Bereich ausführen.

SIE HABEN FRAGEN?

Rezeptservice: ARTROMOT® CPM-Bewegungsschienen

Montag – Freitag 08:00 – 16:00 Uhr

Tel.: 0800 1 676 333 Fax: 0800 3 676 333 E-Mail: homecareservice@enovis.com

FOLGEN SIE UNS



enovis_d_a_ch



Enovis DACH

enovis™

Creating Better Together™

ORMED GmbH, Bötzingen Straße 90, 79111 Freiburg, DEUTSCHLAND

enovis-medtech.de

Wichtiger Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass weder DJO, LLC, noch eine seiner Tochtergesellschaften medizinische Ratschläge geben können. Die Inhalte dieser Broschüre stellen keine medizinische, rechtliche oder andere Art professioneller Beratung dar. Informationen im Hinblick auf unterschiedliche Gesundheitszustände, Erkrankungen und körperliche Verfassungen und deren Behandlung sind nicht als Ersatz für eine Beratung durch einen Arzt oder anderes medizinisches Fachpersonal gedacht. Die Ergebnisse können individuell unterschiedlich sein. Diese Broschüre enthält allgemeine Informationen zur Orientierung. Für die Richtigkeit aller Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden und es können keine Rechtsansprüche gegen die Verfasser der Broschüre oder gegen denjenigen, der die Broschüre übergeben hat, abgeleitet werden.