

PROCARE® ShoeLift™

Höhenausgleichsschuh zum Ausgleich von Beinlängendifferenzen beim Tragen von Fußorthesen

Merkmale

- Der PROCARE® ShoeLift™ ermöglicht den Ausgleich von Beinlängendifferenzen
- Hilft bei der Verringerung der körperlichen Anstrengung beim Tragen eines Gipses oder einer Unterschenkel-Fuß-Orthese
- Einfach und schnell anzulegen
- In drei Größen erhältlich

Zweckbestimmung

- Zum Ausgleichen von Beinlängendifferenzen beim Tragen von Unterschenkel-Fuß-Orthesen
- Empfohlen zur Verwendung an einem fest zugeschnürten festen Schuh bzw. Turnschuh



Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

Der Schuh muss stets fest zugeschnürt sein. Entfernen Sie die ShoeLift™ Schuherhöhung zum Autofahren. Seien Sie stets vorsichtig und sorgsam bei der Verwendung der ShoeLift™ Schuherhöhung. Die falsche Verwendung oder Anbringung der ShoeLift™ Schuherhöhung kann zu Verletzungen führen. Wenn während der Verwendung dieses Produktes Schmerzen, Schwellungen, Empfindlichkeitsveränderungen oder andere ungewöhnliche Reaktionen auftreten, sollten Sie sofort Kontakt mit Ihrem Arzt aufnehmen.

PROCARE® ShoeLift™ Größentabelle

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Schuhgröße
79-95603	SHOELIFT	S	< 41
79-95605	SHOELIFT	M	41–44
79-95607	SHOELIFT	L	> 44

Wir sind für Sie da!

Unser Kundenservice in Freiburg:

Telefon: 01801 676 333

E-Mail: orthopaedietechnik@djoglobal.com