

Knieruhigstellungssorthese, einstellbar (0° und 20°), mit optionaler Kühlung und Kompression.

## Anlegen der Orthese:



1. Die 3 Stoffteile entsprechend Beinform und –umfang aneinander kletten.



2. Das innere rutschfeste Band unterhalb der Kniescheibe schließen.




3. Die Orthese schließen.



4. Die Verschlussgurte festziehen, nachfolgend mittels der Klickverschlüsse öffnen und schließen.

## Anlegeanleitung für Kühlung und Kompression:

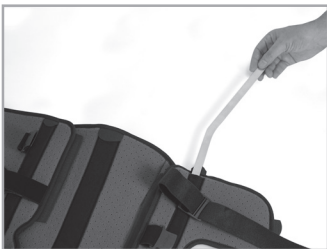

5. Austausch der seitlichen 0°-Stabilisatoren gegen 20°-Stabilisatoren nach Bedarf.



6a. Das Gel-Pack vorab mindestens 4 Stunden in den Gefrierschrank (-12 °C bis -20 °C) legen.



6b. Das aufpumpbare Luftkissen mit abnehmbarer Luftpumpe bereit legen.



7. Die zwei knienahen Gurte der Orthese öffnen.



8. Das Gel-Pack dem Überzug abdecken und in das Luftkissen einkletten.



9. Luftkissen und Gel-Pack mit den seitlichen Klettbindern befestigen.



10. Die knienahen Gurte der Orthese wieder schließen.



11a. ACHTUNG: Vor Abschneiden der überstehenden Gurtenden erst die Kompressions- und Kühleinheit anpassen!



11b. ACHTUNG: Vor Abschneiden der überstehenden Gurtenden erst die Kompressions- und Kühleinheit anpassen!



12. Zum Aufpumpen das Ventil auf "ON", anschließend auf "OFF" stellen und die Pumpe abnehmen.



13. Zum Luftablassen das Ventil auf "ON" und schwarzen Knopf an der Pumpe drücken.



14. Kompressions- und Kühleinheit können auch separat angelegt werden.

## enovis™

Creating Better Together™

enovis-medtech.de

ORMED GmbH, Bötzingler Straße 90, 79111 Freiburg, DEUTSCHLAND

### Wichtiger Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass weder DJO, LLC, noch eine seiner Tochtergesellschaften medizinische Ratschläge geben können. Die Inhalte dieser Anlegeanleitung stellen keine medizinische, rechtliche oder andere Art professioneller Beratung dar. Informationen im Hinblick auf unterschiedliche Gesundheitszustände, Erkrankungen und körperliche Verfassungen und deren Behandlung sind nicht als Ersatz für eine Beratung durch einen Arzt oder anderes medizinisches Fachpersonal gedacht. Die Ergebnisse können individuell unterschiedlich sein. Diese Anlegeanleitung enthält allgemeine Informationen zur Orientierung. Für die Richtigkeit aller Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden und es können keine Rechtsansprüche gegen die Verfasser der Anlegeanleitung oder gegen denjenigen, der diese Anlegeanleitung übergeben hat, abgeleitet werden.