



RICHTIG
POSITIONIERT –
ENTSPANNT
THERAPIERT

EXOS® Manu Advance **NEU**



EXOS® Manu Advance **NEU**

Thermoplastisch verformbare Hand-/Unterarmorthese zur Immobilisierung
HMV-Nummer: 23.07.02.5021

Mit ihrem komplett zu öffnenden, umhüllenden Design macht die EXOS® Manu Advance die Nutzung der thermoplastischen Therapie für Handgelenkverletzungen noch einfacher!

INDIKATIONEN

Zur Immobilisierung des Handgelenks und des distalen Unterarms, wie z. B.

- Handgelenkfrakturen (z. B. nicht operative Behandlung von dislozierten, distalen Radiusfrakturen)
- Posttraumatische Zustände
- Konservative, prä- bzw. postoperative Behandlung

MERKMALE

- **Schnelle, zirkuläre Anwendung** – komplett öffnenbares Design mit dem praktischen Längsklettverschluss. Kann um den Unterarm gewickelt werden, um den gewohnten Anpassungsprozess nun auch mit EXOS bequem zu gewährleisten. Im Vergleich zu einer Gipsversorgung wird mit EXOS etwa die Hälfte der Arbeitszeit benötigt.
- **Erhitzen, anpassen, wiederholen** – Die Orthese wird nach ca. 5 Minuten erhitzen im EXOS Ofen weich. Dann ist sie bereit zum Anpassen. EXOS ist erneut erwärm- und damit neu anformbar (z. B. bei Rückgang der Schwellung).
- **Einfach anpassbar und verschließbar** – Das BOA Verschlussystem ermöglicht präzises Immobilisieren, schnelles Öffnen und zuverlässiges Verschließen. Ist ohne Nutzung einer Säge abnehmbar – ideal für regelmäßige Untersuchungen.
- **Verbesserte Hygiene** – waschbar und wasserfest. Kann von Hand gewaschen und mit dem Fön getrocknet werden. Antibakteriell behandelte Materialien mindern die Geruchsentwicklung.
- **Komfortabel und leicht** – gesteigerter Tragekomfort durch Materialien, die spürbar angenehm sind und deutlich leichter als Cast oder Fiberglas.
- **Röntgenfreundlich** – Das röntgendurchlässige Material ermöglicht Aufnahmen, ohne die Orthese abnehmen zu müssen.



Wiederanformbar



Wasserfest




Abnehmbar



Einfach & schnell

Schnelle, zirkuläre Anwendung durch den Längsklettverschluss möglich!

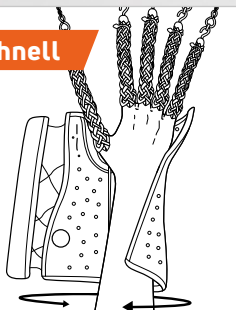

Handumfang

BESTELLINFORMATIONEN

Größe	Handumfang	Artikelnummer	
		Links	Rechts
XS	18,5–20,0 cm	329-31-1111	329-32-1111
S	20,0–23,0 cm	329-41-1111	329-42-1111
M	23,0–25,5 cm	329-51-1111	329-52-1111
L	25,5–28,0 cm	329-61-1111	329-62-1111
XL	28,0–30,5 cm	329-71-1111	329-72-1111

Wichtiger Hinweis! Bitte beachten Sie, dass weder DJO, LLC, noch eine seiner Tochtergesellschaften medizinische Ratschläge geben können. Die Inhalte dieser Broschüre stellen keine medizinische, rechtliche oder andere Art professioneller Beratung dar. Informationen im Hinblick auf unterschiedliche Gesundheitszustände, Erkrankungen und körperliche Verfassungen und deren Behandlung sind nicht als Ersatz für eine Beratung durch einen Arzt oder anderes medizinisches Fachpersonal gedacht. Die Ergebnisse können individuell unterschiedlich sein. Diese Broschüre enthält allgemeine Informationen zur Orientierung. Für die Richtigkeit aller Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden und es können keine Rechtsansprüche gegen die Verfasser der Broschüre oder gegen denjenigen, der die Broschüre übergeben hat, abgeleitet werden.