


**BITTE LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DES DONJOY® NEXTEP XCEL™ AIR ANKLE WALKER DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG DURCH. DAS SACHGEMÄSSE ANLEGEN DER ORTHESE IST EINE WESENTLICHE VORAUSSETZUNG FÜR EINEN ERFOLGREICHEN THERAPIEVERLAUF.**

## Anlegeanleitung




**1.** Setzen Sie sich zum Anlegen des DONJOY® Nextep Xcel™ Air Ankle Walkers bequem hin.

**2.** Öffnen Sie alle Gurte und entfernen Sie die Vorderabdeckung (Frontschale) des Walkers.


**3.** Stellen Sie Ihren Fuß in den Walker. Schließen Sie das Innenfutter (Liner) mit den Klettaschen. Achten Sie darauf, dass der vordere Teil (Zehenbereich) richtig über dem Vorfuß liegt.

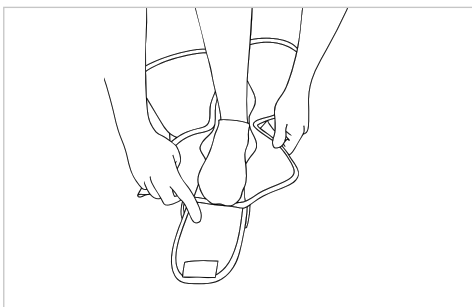


**4.** Positionieren Sie die Vorderabdeckung und schließen Sie die Gurte - beginnen Sie am Zehenbereich und arbeiten Sie sich dann nach oben. Die Pumpe kann am Innenfutter über die Klettbefestigung versetzt werden, damit sie korrekt in die Öffnung oben an der Vorderabdeckung passt. Die Gurte nicht zu fest anziehen und je nach Schwellung verändern.

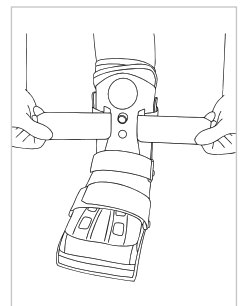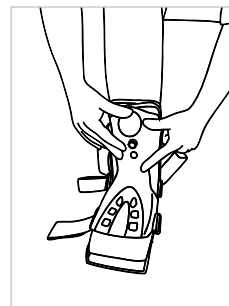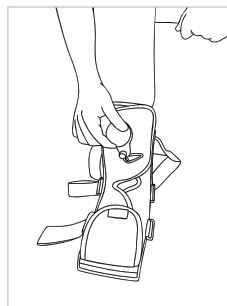

**5.** Zum Aufpumpen der Luftkammern drücken und lösen Sie den roten Pumpball, bis eine angenehme Polsterung und Unterstützung erreicht ist. Nicht übermäßig aufpumpen.

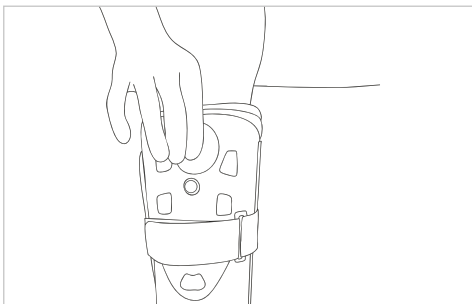

**6.** Zum Anpassen oder Ablassen des Drucks drehen Sie das Ablassventil, bis sich der Druck angenehm anfühlt.

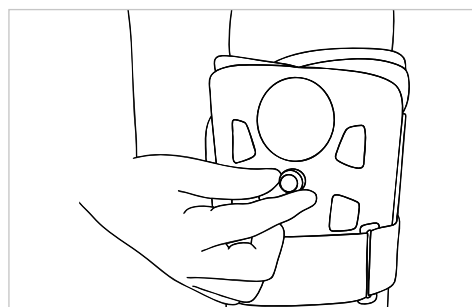

**7.** Zum Ausziehen des Walkers zuerst die Luftkammern über das Ablassventil vollständig entleeren. Öffnen Sie dann die Gurte. Danach können Sie die Vorderabdeckung abnehmen und das Innenfutter öffnen. Ziehen Sie den Fuß vorsichtig aus dem Walker heraus.

## ZWECKBESTIMMUNG / INDIKATIONEN:

Der Donjoy Nextep Xcel Air Ankle Walker dient zur Unterstützung und Immobilisierung von Fuß und Sprunggelenk. Erfür die Behandlung von schweren akuten Sprunggelenksverstauchungen, Weichteilverletzungen von Fuß und Sprunggelenk, Ermüdungsbrüchen des Fußes, stabilen Frakturen des Fußes und Bänderverletzungen wie Plantarfasziitis geeignet sein.

## WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Eine vollständige Liste der Kontraindikationen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen finden Sie in der Gebrauchsanweisung

## REINIGUNG

Den Innenschuh (Liner) zur Reinigung in kaltem Wasser mit milder Seife von Hand waschen. Die Kunststoffteile können mit einem Tuch und milder Seifenlösung oder einem geeigneten Desinfektionsmittel gereinigt werden. Anschließend an der Luft trocknen lassen.

## FÜR DIE VERWENDUNG DURCH EINEN EINZELNEN PATIENTEN BESTIMMT NICHT AUS NATURKAUTSCHUKLATEX HERGESTELLT

**HINWEIS:** Dieses Produkt wurde mit großer Sorgfalt entwickelt und hergestellt, um eine hohe Funktionalität, Stabilität, Haltbarkeit und einen guten Tragekomfort zu gewährleisten. Dennoch kann nicht garantiert werden, dass durch die Verwendung dieses Produkts Verletzungen vollständig verhindert werden.

## BESTELLINFORMATION

| ARTIKELNUMMER | EU-SCHUHGRÖSSE | GRÖSSE |
|---------------|----------------|--------|
| 82-116-S      | < 39           | S      |
| 82-116-M      | 39 - 44        | M      |
| 82-116-L      | > 44           | L      |



**enovis™**

*Creating Better Together™*

**enovis-medtech.de**

ORMED GmbH, Bötzingen Straße 90, 79111 Freiburg, DEUTSCHLAND

### Wichtiger Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass weder DJO, LLC, noch eine seiner Tochtergesellschaften medizinische Ratschläge geben können. Die Inhalte dieser Anlegeanleitung stellen keine medizinische, rechtliche oder andere Art professioneller Beratung dar. Informationen im Hinblick auf unterschiedliche Gesundheitszustände, Erkrankungen und körperliche Verfassungen und deren Behandlung sind nicht als Ersatz für eine Beratung durch einen Arzt oder anderes medizinisches Fachpersonal gedacht. Die Ergebnisse können individuell unterschiedlich sein. Diese Anlegeanleitung enthält allgemeine Informationen zur Orientierung. Für die Richtigkeit aller Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden und es können keine Rechtsansprüche gegen die Verfasser der Anlegeanleitung oder gegen denjenigen, der diese Anlegeanleitung übergeben hat, abgeleitet werden.