

Legen Sie den Patienten die PSI Plus in einer aufrechten Position im Sitzen oder Stehen an.



1. Anlegen des Brustbands

- Brustband um den Brustkorb legen und fixieren
- Schlaufe (Oberarmgurt) befindet sich auf der betroffenen Seite
- Gesunder Arm stützt den verletzten Arm



2. Schultergurt fixieren

- Gurt über die nicht betroffene Schulter führen
- Gurt an der Handgelenksschlaufe fixieren



3. Oberarmgurt fixieren

- Oberarm mit dem Oberarmgurt fixieren



4. PSI Plus final anpassen

- Handgelenk mit dem Handgelenkgurt fixieren
- Tragekomfort, Schulter sowie Ellebogenwinkel kontrollieren

Größentabelle

GRÖßE	BAUCHUMFANG	ARTIKEL-NR.
Standard	< 115 cm	OX0380PLUS
Lang	115 - 135 cm	OX0381PLUS



enovis™

Creating Better Together™

enovis-medtech.de

ORMED GmbH, Bötzingler Straße 90, 79111 Freiburg, DEUTSCHLAND

Wichtiger Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass weder DJO, LLC, noch eine seiner Tochtergesellschaften medizinische Ratschläge geben können. Die Inhalte dieser Anlegeanleitung stellen keine medizinische, rechtliche oder andere Art professioneller Beratung dar. Informationen im Hinblick auf unterschiedliche Gesundheitszustände, Erkrankungen und körperliche Verfassungen und deren Behandlung sind nicht als Ersatz für eine Beratung durch einen Arzt oder anderes medizinisches Fachpersonal gedacht. Die Ergebnisse können individuell unterschiedlich sein. Diese Anlegeanleitung enthält allgemeine Informationen zur Orientierung. Für die Richtigkeit aller Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden und es können keine Rechtsansprüche gegen die Verfasser der Anlegeanleitung oder gegen denjenigen, der diese Anlegeanleitung übergeben hat, abgeleitet werden.