


## ANPASSUNG: SCHNELL UND EINFACH

### 1 UMFANG MESSEN UND GRÖSSE AUSWÄHLEN

EXOS <sup>™</sup> Größe	Handumfang in cm
XXXS	14,5 - 16,5
XS-KIND + XXS	16,5 - 18,5
XS	18,5 - 20,0
S	20,0 - 23,0
M	23,0 - 25,5
L	25,5 - 28,0
XL	> 28

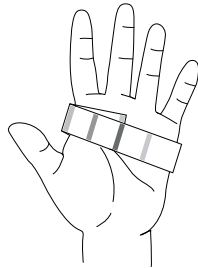

EXOS<sup>™</sup>-Maßband\* zwischen Daumen und Zeigefinger anlegen und Orthesengröße ablesen. Alternativ mit haushaltsüblichen Maßband den Handumfang messen und Orthesengröße auswählen.

### 2 VORBEREITEN



BOA® -Kabelzug komplett ausziehen und Orthese auseinander klappen.

### 3 ERWÄRMEN

1. Lesen Sie vor der Verwendung einer EXOS<sup>™</sup>-Orthese die Produkthinweise durch.
2. Stellen Sie die Ofentemperatur zwischen MED und HI ein. Der Ofen muss nicht vorgeheizt werden.
3. Setzen Sie den Zeitregler auf 3-5 Minuten. Siehe hierzu Produkthinweise für empfohlene Erwärmungszeit je Produkt und legen Sie die Orthese in den Ofen.
4. Nach dem ertönen des Signals EXOS<sup>™</sup>-Orthese aus dem Ofen entnehmen.




**WARNUNG:** EXOS<sup>™</sup>-Orthesen dürfen nicht länger als 15 Minuten erwärmt werden.

### 4 ANPASSEN



1. Dem Patienten die geöffnete EXOS<sup>™</sup> überziehen.
2. EXOS<sup>™</sup> individuell anformen.
3. Zum Schluss mit dem BOA® Verschlusssystem die bedarfsgerechte Kompression einstellen. Um Druckstellen zu vermeiden, sollte die Kompression nicht zu stark eingestellt werden.

### 5 GEBRAUCHSANWEISUNG ÜBERGEBEN

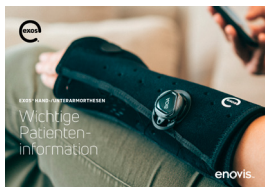

#### WICHTIG:

- Im Besonderen auf die Reinigungs- und Pflegehinweise in der Gebrauchsanleitung und Patientinformation hinweisen.
- Beides dem Patienten übergeben.

**enovis<sup>™</sup>**  
*Creating Better Together<sup>™</sup>*

ORMED GmbH, Bötzingen Straße 90, 79111 Freiburg  
DEUTSCHLAND

enovis-medtech.de | Tel. 0180 1 676 333  
Fax 0180 11 676 33  
E-Mail: orthopaedietechnik@enovis.com

Copyright © 2025 DJO, LLC, a subsidiary of Enovis Corporation  
MKT-00-1255DE-Rev.F-2025-23-07

# EXOS<sup>®</sup>

**WEITERE INFORMATIONEN RUND UM EXOS<sup>™</sup>**

**enovis-medtech.de**

**HABEN SIE FRAGEN ZU EXOS<sup>™</sup>?**

Unser Kundenservice in Freiburg ist gerne für Sie da!

**Telefon: 0180 1 676 333**

**E-Mail: orthopaedietechnik@enovis.com**

#### Wichtiger Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass weder DJO, LLC, noch eine seiner Tochtergesellschaften medizinische Ratschläge geben können. Die Inhalte dieses Produktdatenblattes stellen keine medizinische, rechtliche oder andere Art professioneller Beratung dar. Informationen im Hinblick auf unterschiedliche Gesundheitszustände, Erkrankungen und körperliche Verfassungen und deren Behandlung sind nicht als Ersatz für eine Beratung durch einen Arzt oder anderes medizinisches Fachpersonal gedacht. Die Ergebnisse können individuell unterschiedlich sein. Dieses Produktdatenblatt enthält allgemeine Informationen zur Orientierung. Für die Richtigkeit aller Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden und es können keine Rechtsansprüche gegen die Verfasser des Produktdatenblattes oder gegen denjenigen, der dieses Produktdatenblatt übergeben hat, abgeleitet werden.