

AirSelect™ Elite Walker

AIRCAST®

Yürüme botunu sadece oturur pozisyonda giyin ve optimal hijyen ve mümkün olan en yüksek konfor için teslimat kapsamında verilen çorapları kullanın.



1. Yürüme botunun hazırlanması

- Yürüme botu giyilmenden önce hava hücreleri şişirilmemelidir
- Kayışları çözün, ön kabuğu çıkarın ve ayak parmakları kulağını ve ayak kulağını açın




2. Ayağın yürüme botuna yerleştirilmesi

- Topuğu arkaya yerleştirin
- Ayak kulağını ve ayak parmakları kulağını kapatın



3. Ön kabuğun takılması

- AIRCAST® logosu ayak parmaklarının üstünde yer alır
- Alt ön kabuğun (ayak bölümü) yanları yürüme botunun içinde yer alır
- Üst ön kabuğun yanları yürüme botunun dışında yer alır

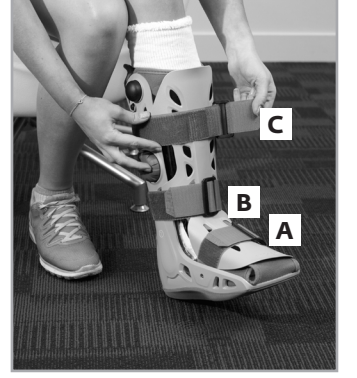

4. Kayışların bağlanması

- Kayışları aşağıdan yukarıya doğru bağlayın (A, B & C)
- Kayışları, yürüme botu ayağa sıkı ama rahat bir şekilde oturacak şekilde sıkılayın



5. Hava hücrelerinin basıncının ayarlanması

- Öncelikle yaralı taraftaki hava hücrelerini doldurun
- Yürüme botunun sağ tarafındaki döner çarkı uygun numaraya getirin: Numara 1: Sağ hava hücrelerini doldurur Numara 2: Sol hava hücrelerini doldurur Numara 3: Arka hava hücrelerini doldurur
- Tüm hava hücrelerini şişirdikten sonra döner çarkı kilitle işaretine getirin



6. Hava hücrelerinin şişirilmesi

- Büyük pompanın ortasına (sağ üst) basın ve yavaşça serbest bırakın
- Hava hücreleri sıkı ama rahat bir şekilde oturana kadar pompalayın
- Diğer hava hücreleri için işlemi tekrarlayın
- Hava hücrelerinin fazla şişirilmesi durumunda havayı biraz boşaltın

Yürüme botunun çıkarılması

Yürüme botunun tekrar doğru bir şekilde giyilebilmesi için yürüme botu çıkarılmadan önce havanın boşaltılması gerekir

- Büyük seçim çarkını hücrenin ilgili numarasına kadar (Şekil 5) çevirin
- Yürüme botunun sağ üst kısmında bulunan küçük tahliye düğmesine basın
- Diğer hava hücreleri için işlemi tekrarlayın
- Kayışları çözün, ön kabuğu çıkarın ve ayak parmağı kulağını ve ayak kulağını açın

Beden tablosu

BEDEN	SAĞ/SOL TARAF	AYAKKABI NUMARASI
XS	EVRENSEL	32-34
S	EVRENSEL	35-38
M	EVRENSEL	39-42
L	EVRENSEL	43-45
XL	EVRENSEL	46-48

Güvenlik önlemleri

- Hava hücrelerini aşırı esnetmeyin
- Cildi düzenli olarak basınç noktaları ve cilt tahrişi açısından kontrol edin. Ciltte değişiklik veya rahatsızlık meydana gelirse hava hücresi basıncını azaltın
- Ameliyat sonrası anestezi, sinir, cilt veya diğer rahatsızlıklar nedeniyle ayakta veya alt bacakta his yoksa yürüme botunu kullanmayın

enovis™

Creating Better Together™

enovis-medtech.de

ORMED GmbH, Bötzingler Straße 90, 79111 Freiburg, GERMANY

Önemli uyarı!

Lütfen DJO LLC veya bağlı şirketlerinden birinin tıbbi tavsiyeler veremeyeceğini dikkate alın. Bu giyme kılavuzunun içeriği tıbbi, hukuki veya başka türde profesyonel bir bilgilendirme niteliği taşımaz. Çeşitli sağlık koşulları, hastalıklar ve fiziksel durumlar ve bunların tedavisine ilişkin bilgiler, bir doktor veya diğer sağlık profesyonelleri tarafından verilecek bilgilerin yerine geçmez. Sonuçlar kişiden kişiye değişebilir. Bu giyme kılavuzu yalnızca rehberlik amaçlı genel bilgiler içerir. Ancak, tüm bilgilerin doğruluğu konusunda hiçbir sorumluluk üstlenilemez ve giyme kılavuzunun yazarlarına veya bu giyme kılavuzunu teslim eden kişiye karşı herhangi bir yasal hak iddia edilemez.